

Laxik pre deti

€ Zdravotnícka pomôcka

Mikroklystír 3 g – Glycerol • Harmanček • Slez

Laxik je jednorazová zdravotnícka pomôcka (mikroklyzma) na báze glycerolu, harmančeka a slezu na rektálne použitie určená na uľahčenie vyprázdenia pri zápche. Je tiež určená pre deti.

MECHANIZMUS ÚČINKU

Glycerol pôsobí mechanicky prehŕňavo vďaka účinku vtiahnutia vody do stolice, jej zmäkčeniu a vyvolaniu peristaltiky a črevnej evakuácie.

INDIKÁCIA

Laxik je určený na krátkodobú liečbu občasnej zápchy.

ZLOŽENIE

Účinné látky: glycerol, harmanček a slez.

NÁVOD NA POUŽITIE

Každá dávka prípravku Laxik zostáva až do okamihu použitia jednotlivito uzavretá, aby bola zaručená hygiena a praktickosť použitia. Na otvorenie dózy uchopte hrdlo viečka a otočením ho odstráňte. Pri manipulácii netlačte na pružné telo dózy, aby sa pred použitím nevyliat obsah produktu. Vhodné je kanylu namazať kvapkou roztoku. Zavedte kanylu do konečníka a stlačte nádobu. Nádobu držte stlačenú, vytiahnite ju a vyhodte.

DÁVKOVANIE

Deti: 1 mikroklyzma podľa potreby, jedenkrát až dvakrát denne.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte pri precitlivencosti alebo alergii na jednu alebo viac zložiek. V prípade pretrvávajúcej zápchy je dôležité poradiť sa s lekárom, aby sa vylúčili iné patológie. Mikroklyzma je na jedno použitie, a preto by sa nemala používať opakovane, aj keď je podaná len polovica dávky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prehŕňadlá by mali byť používané čo najmenej často, a nie dlhšie ako sedem dní. Užívanie po dlhšiu dobu vyžaduje predpis lekára po zodpovedajúcom zhodnotení individuálneho prípadu. Pri zápche je vhodné najprv upraviť stravovacie návyky doplnením stravy o dostatočný príjem dočenskej vody.

SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote medzi 4 až 30 °C, mimo zdroja tepla a mimo dosahu priameho svetla. Dátum použiteľnosti sa vzťahuje na neporušený a správne skladovaný výrobok.

DÁTUM POUŽITEĽNOSTI

Víď dátum použiteľnosti uvedený na obale. Nepoužívajte po uvedenom dátume použiteľnosti.

BALENIE

2 jednorazové mikroklystíry 3g.

Zoznam symbolov



Šarža



Skladujte pri teplote medzi 4 až 30 °C



Nepoužívajte opakovane



Po použití nevyhadzujte do životného prostredia



Dátum použiteľnosti



Výrobca



Zdravotnícka pomôcka



Preštudujte si príbalový leták



Výrobce: New.Fa.Dem. Srl
Viale Ferrovie dello Stato, 1 - Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (Na) Italy

Distribútor pre SK:

Otakar Horák - H - Kontipro s.r.o.,
Kragujevská 398/4, 010 01 Žilina
www.h-kontipro.sk

Dátum poslednej revízie: Január 2024

Laxik pro děti

CE Zdravotnický prostředek

Mikroklýstýr 3 g – Glycerol • Heřmánek • Sléz

Laxik je jednorázový zdravotnický prostředek (mikroklýzma) na bázi glycerolu, heřmánku a slézu pro rektální použití určený k usnadnění vyprázdnění při zácpě. Je rovněž určený pro děti.

MECHANISMUS ÚČINKU

Glycerol působí mechanicky projímavě díky účinku vtažení vody do stolice, jejímu změkčení, vyvolání peristaltiky a střevní evakuace.

INDIKACE

Laxik je určen ke krátkodobé léčbě občasné zácpy.

SLOŽENÍ

Účinné látky: glycerol, heřmánek a sléz.

NÁVOD K POUŽITÍ

Každá dávka přípravku Laxik zůstává až do okamžiku použití jednotlivě uzavřena, aby byla zaručena hygiena a praktičnost použití. Pro otevření dózy uchopte hrdlo víčka a otočením jej odstraňte. Při manipulaci netlačte na pružné tělo dózy, aby se před použitím nevyliil obsah produktu. Vhodné je kanylu namazat kapkou roztoku. Zaveďte kanylu do konečníku a stiskněte nádobu. Nádobu držte stisknutou, vytáhněte ji a vyhoďte.

DÁVKOVÁNÍ

Děti: 1 mikroklýzma dle potřeby, jedenkrát až dvakrát denně.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte při přecitlivělosti nebo alergii na jednu nebo více složek. V případě přetrvávající zácpy je důležité poradit se s lékařem, aby se vyloučily jiné patologie. Mikroklýzma je na jedno použití, a proto by se nemělo používat opakovaně, i když je podána jen polovina dávky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Projímadla by měla být používána co nejméně často, a ne déle než sedm dní. Užívání po delší dobu vyžaduje předpis lékaře po odpovídajícím zhodnocení individuálního případu. Při zácpě je vhodné nejprve upravit stravovací návyky doplněním stravy o dostatečný příjem kojenecké vody.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě mezi 4 až 30 °C, mimo zdroje tepla a mimo dosah přímého světla. Datum použitelnosti se vztahuje na neporušený a správně skladovaný výrobek.

DATUM POUŽITELNOSTI

Viz datum použitelnosti uvedené na obale. Nepoužívejte po uvedeném datu použitelnosti.

BALENÍ

2 jednorázové mikroklýstýry 3g.

Seznam symbolů



Šarže



Skladujte při teplotě mezi 4 až 30 °C



Nepoužívejte opakovaně



Po použití nevyhazujte do životního prostředí



Datum použitelnosti



Výrobce



Zdravotnický prostředek



Prostudujte si příbalový leták



Výrobce: New.Fa.Dem. Srl
Viale Ferrovie dello Stato, 1 - Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (Na) Italy

Distributor pro ČR:

Beaufy s.r.o., U Trati 886/52, 100 00 Praha 10
www.beaufy.eu

Datum poslední revize: Leden 2024