

Glycerol New.Fa.Dem.



Mikroklystýr pro dospělé 9 g – Glycerol • Heřmánek • Sléz

Glycerol New.Fa.Dem. je jednorázový zdravotnický prostředek (mikroklyzma) na bázi glycerolu, heřmánku a slézu pro rektální použití určený k usnadnění vyprázdnění při zácpě.

MECHANISMUS ÚČINKU

Glycerol působí mechanicky projímavě díky účinku vtažení vody do stolice, jejímu změkčení, vyvolání peristaltiky a střevní evakuace.

INDIKACE

Glycerol New.Fa.Dem. je určen ke krátkodobé léčbě občasných zácp.

SLOŽENÍ

Účinné látky: glycerol, heřmánek a sléz.

NÁVOD K POUŽITÍ

Každá dávka přípravku Glycerol New.Fa.Dem. zůstává až do okamžiku použití jednotlivě uzavřena, aby byla zaručena hygiena a praktičnost použití. Pro otevření dózy uchopte hrdlo víčka a otočením jej odstraňte. Při manipulaci netlačte na pružné tělo dózy, aby se před použitím nevyllil obsah produktu. Vhodné je kanylu namazat kapkou roztoku. Zavedte kanylu do konečníku a stiskněte nádobu. Nádobu držte stisknutou, vytáhněte ji a vyhodte.

DÁVKOVÁNÍ

Dospělí: 1 mikroklyzma dle potřeby, jedenkrát až dvakrát denně.

UPOZORNĚNÍ

Nepoužívejte při precitlivlosti nebo alergii na jednu nebo více složek. V případě přetrvávající zácpy je důležité poradit se s lékařem, aby se vyloučily jiné patologie. Mikroklyzma je na jedno použití, a proto by se nemělo používat opakovaně, i když je podána jen polovina dávky. Uchovávejte mimo dosah dětí. Projímadla by měla být používána co nejméně často, ne déle než sedm dní. Užívání po delší dobu vyžaduje předpis lékaře po odpovídajícím zhodnocení individuálního případu. Při zácpě je vhodné nejprve upravit stravovací návyky doplněním stravy o dostatečný příjem vlákniny a vody. V těhotenství a při kojení se před použitím tohoto produktu poraďte se svým lékařem nebo lékárníkem. Studie o použití přípravku během těhotenství a při kojení nejsou k dispozici.

SKLADOVÁNÍ

Skladujte při teplotě mezi 4 až 30 °C, mimo zdroje tepla a mimo dosah přímého světla. Datum použitelnosti se vztahuje na neporušený a správně skladovaný výrobek.

DATUM POUŽITELNOSTI

Viz datum použitelnosti uvedené na obale. Nepoužívejte po uvedeném datu použitelnosti.

BALENÍ

6 jednorázových mikroklystýrů 9g.

Seznam symbolů



Zdravotnický
prostředek



Skladujte při teplotě
mezi 4 až 30°C



Šarže



Po použití nevyhazujte
do životního prostředí



Nepoužívejte
opakovaně



Výrobce



Datum
použitelnosti



Prostudujte si
příbalový leták

Datum poslední revize: Červenec 2024



New.Fa.Dem. Srl
Viale Ferrovie dello Stato, 1 - Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (Na) Italy

Distributor pro ČR:
Beaufy s.r.o.,
U Trati 886/52, 100 00 Praha 10
www.beaufy.eu

Glycerol New.Fa.Dem.



Mikroklystír pre dospelých 9 g – Glycerol • Harmanček • Slez

Glycerol New.Fa.Dem. je jednorazová zdravotnícka pomôčka (mikroklyzma) na báze glycerolu, harmančeka a slezu na rektálne použitie určená na uľahčenie vyprázdnenia pri zápche.

MECHANIZMUS ÚČINKU

Glycerol pôsobí mechanicky prehánavo vďaka účinku vtiahnutia vody do stolice, jej zmäkčeniu a vyvolaniu peristaltiky a črevnej evakuácie.

INDIKÁCIA

Glycerol New.Fa.Dem. je určený na krátkodobú liečbu občasnej zápchy.

ZLOŽENIE

Účinné látky: glycerol, harmanček a slez.

NÁVOD NA POUŽITIE

Každá dávka prípravku Glycerol New.Fa.Dem. zostáva až do okamihu použitia jednotlivito uzavretá, aby bola zaručená hygiena a praktickosť použitia. Pre otvorenie dózy uchopte hrdlo viečka a otočením ho odstráňte. Pri manipulácii netlačte na pružné telo dózy, aby sa pred použitím nevyliat obsah produktu. Vhodné je kanylu namazať kvapkou roztoku. Zavedte kanylu do konečníka a stlačte nádobu. Nádobu držte stlačenú, vytiahnite ju a vyhodte.

DÁVKOVANIE

Dospelí: 1 mikroklyzma podľa potreby, jedenkrát až dvakrát denne.

UPOZORNENIE

Nepoužívajte pri precitlivlosti alebo alergii na jednu alebo viac zložiek. V prípade pretrvávajúcej zápchy je dôležité poradiť sa s lekárom, aby sa vylúčili iné patológie. Mikroklyzma je na jedno použitie, a preto by sa nemala používať opakovane, aj keď je podaná len polovica dávky. Uchovávajte mimo dosahu detí. Prehľadl by mali byť používané čo najmenej často, nie dlhšie ako sedem dní. Užívanie po dlhšiu dobu vyžaduje predpis lekára po zodpovedajúcom zhodnotení individuálneho prípadu. Pri zápche je vhodné najprv upraviť stravovacie návyky doplnením stravy o dostatočný príjem vlákniny a vody. V tehotenstve a pri dojčení sa pred použitím tohto produktu poraďte so svojim lekárom alebo lekárnikom. Štúdie o použití lieku počas tehotenstva a pri dojčení nie sú k dispozícii.

SKLADOVANIE

Skladujte pri teplote medzi 4 až 30 °C, mimo zdroja tepla a mimo dosahu priameho svetla. Dátum použiteľnosti sa vzťahuje na neporušený a správne skladovaný výrobok.

DÁTUM POUŽITELNOSTI

Viď dátum použiteľnosti uvedený na obale. Nepoužívajte po uvedenom dátume použiteľnosti.

BALENIE

6 jednorazových mikroklystírov 9g.

Zoznam symbolov



Zdravotnícka
pomôčka



Skladujte pri teplote
medzi 4 až 30°C



Šarža



Po použití nevyhadzujte
do životného prostredia



Nepoužívajte
opakovane



Výrobca



Dátum
použitelnosti



Prestudujte si
príbalový leták

Dátum poslednej revízie: Júl 2024



New.Fa.Dem. Srl
Viale Ferrovie dello Stato, 1 - Zona ASI
80014 Giugliano in Campania (Na) Italy

Distribútor pre SK:
Beaufy s.r.o.,
U Trať 886/52, 100 00 Praha 10
www.beaufy.eu